



13. Montage der Befestigung am Fenstergriff „Anschlag“

- Den Hebel des Fenstergriffes in waagerechte Lage drehen.
- Die Aufnahmhülse des Gerätes auf den Fenstergriff aufschieben.
- Die präparierte Schneckengewindeschelle 1 am Hebel des Fenstergriffes möglichst nahe zu seiner Spitze mit zum Fenster gedrehtem Verschluss und der nach oben gerichteten Schraube 2 platzieren und die Schraube 2 festziehen.

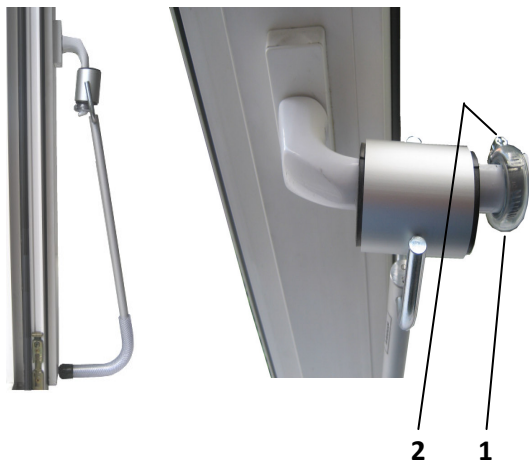

14. Zusammenbau des Stieles aus zwei Teilen

- Beide Teile des Stieles (Bild unten) so zusammenstecken, dass die Markierungen A gegenübereinander liegen und die Bohrung C im Rohr auf die Bohrung D im Schaft genau angepasst ist.
- Den Stoß des Stieles mit den nach oben gewendeten Markierungen A auf eine nicht sehr harte Unterlage (Holz o. ä.) auflegen und den beigefügten Spannstift B sorgfältig einpressen bzw. einschlagen.

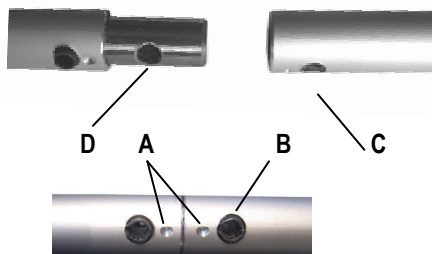

Nie mehr zum Lüften auf Tisch, Stuhl, Leiter steigen müssen



Fensteröffner-Fenstergriffverlängerung DESIGN

Hilfsmittel-Nr. 02.40.04.5001

Gebrauchsanweisung



Einfache und universelle Lösung
für schwer erreichbare Fenster

Plotkina W-INVENTION

Adresse: Flamweg 130, D-25335 Elmshorn
Tel.: +49 (0) 4121 7808948
Fax: +49 (0) 4121 7808949
E-Mail: info@w-invention.de
Web: www.w-invention.de
Shop: www.fenstergriff-verlaengerung.de

W-INVENTION

Zweckbestimmung des Produktes/Indikation

Das Produkt ist überwiegend für Personen, die wegen einer Behinderung oder Krankheit ihre Fenster zum Lüften nicht erreichen können, bestimmt.

Typische Situationen für Einsatz des Produktes: ein Bürotisch, eine Badewanne, eine Küchenarbeitsplatte ist vor dem Fenster aufgestellt bzw. der Fenstergriff sitzt zu hoch.

1. Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen


Dem Hersteller sind keine Anwendungsrisiken bekannt.

Das Gerät ist kein Kraftverstärker. Es kann nur von Personen genutzt werden, die in der Lage sind, ein erreichbares Fenster aus eigener Kraft unmittelbar mit der Hand am Fenstergriff zu betätigen.


Die Personen mit zitternden bzw. unruhigen Händen dürfen, um unabsichtliche Fensterscheibenschäden zu verhindern, nur die dauerhaft am Fenstergriff befestigten Geräte nutzen.

2. Konstruktion

Das Gerät weist einen Stiel 1, einem Handgriff (mit oder ohne Polsterung) 2 und schwenkbare Aufnahme-Hülse 3, in der eine Anti-Rutsch-Einlage installiert ist, auf.

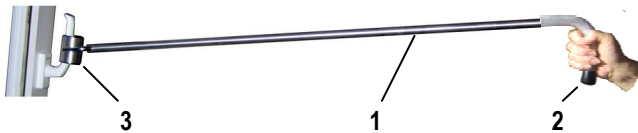

Der Stiel der über 115 cm langen Geräte wird in zwei Teilen, die Vorort zusammengesetzt werden, geliefert. Im Lieferumfang ist evtl. Vorrichtung für dauerhafte Befestigung des Gerätes an einem Fenstergriff „Anschlag“ und Lagerungsmöglichkeit „Wandhaken“.

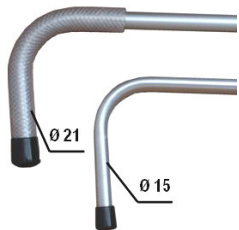

mit und ohne Polsterung



Anschlag



Wandhaken

3. Technische Daten / Parameter

Länge:

- Basislänge ca. 95 cm
- Sonderlängen bis 215 cm

Gewicht:

- Basislänge ca. 0,3 kg
- Sonderlängen bis 0,6 kg

Aufnahme-Hülse

Öffnung der Aufnahme-Hülse ca. Ø 2,8 cm

Länge der Aufnahme-Hülse ca. 5 cm

Griff ohne Polsterung Ø 1,5 cm

Griff mit Polsterung Ø 2,1 cm

Befestigung am Fenstergriff Anschlag

Aufhängung an der Wand Wandhaken

4. Lieferumfang

Lieferumfang bei Bestellungen nach einer ärztlichen Verordnung entsprechend Hilfsmittel-Nr. 02.40.04.5001 umfasst:

- Fensteröffner mit Polsterung*
- Anschlag*
- Wandhaken*
- Gebrauchsanweisung

* Sonst sind die Extras Polsterung, Anschlag, Wandhaken je nach Bedarf frei bestellbar.

5. Zulässige Betriebsbedingungen/Einsatzorte

Das Gerät ist an Dreh-, Kipp-, Drehkipfenstern und Türen mit L-förmigen Fenstergriffen, deren Hebelarm in die Öffnung der Aufnahme-Hülse des Gerätes frei passt, einsetzbar.

6. Anwendungshinweise

Das Gerät kann man entweder abnehmbar für ein oder mehrere Fenster nutzen oder dauerhaft am Fenstergriff eines Fensters befestigen.

Der Stiel des Gerätes soll bei Betätigung vom Fenster nicht über 30° von seiner senkrechten Lage zum Fenster abweichen. Sonst wird man entweder merkbar größere Kraft ansetzen müssen oder das Fenster überhaupt nicht betätigen können.

7. Reinigungshinweise/Desinfektionshinweise

Das Gerät kann mit einem weichen Tuch und Seife mit Wasser gereinigt werden.

8. Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Das Gerät ist für die Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren bestimmt. Zum Wiedereinsatz sind keine zusätzlichen Maßnahmen nötig.

9. Gewährleistung

3 Jahre Herstellergarantie unter Vorlage des Kaufbelegs. Im Übrigen bestehen für den Artikel die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

10. Zusammenbau und Montageanweisungen

Die bis 115 cm langen Geräte sind sofort nach der Auspackung einsatzbereit. Bei den über 115 cm langen Geräten müssen zwei Teilen des Stieles Vorort zusammengesetzt werden. Eine dauerhafte Befestigung am Fenstergriff und Wandhaken müssen ebenso Vorort montiert werden.

Die entsprechenden Zusammenbau- und Montageanleitungen sind unter 12., 13. und 14. vorgeführt.

11. Montage des Wandhakens

- Ø8 x 50 mm Bohrung in der Wand fertigen
- In die Bohrung den beigelegten Dübel 3 installieren.
- Die Wand um die Bohrung mit feuchtem Tuch gründlich entstauben und austrocknen lassen.
- Den Wandschoner 2 von der Unterlage lösen und konzentrisch der Bohrung auf die Wand aufkleben.
- Den Schraubhaken 1 so tief eindrehen, dass er ca. 60 mm aus der Wand steckt.

